

Wie wird die Bibliothek in Ihr **Exocad** System importiert?

1. Schliessen Sie Ihre Exocad Software
2. Entzippen des Ordners “zeramex_exocad_v2”
3. Verschieben Sie den entzippten Ordner in den folgenden Installationsverzeichnis der Exocad Software: \DentalCADApp\library\implant
4. Starten Sie Ihre Exocad Software
5. Sie haben erfolgreich die ZERAMEX® P6 ZERABASE Bibliothek installiert.

Wie wird die Bibliothek in Ihr **3Shape** System importiert?

1. Öffnen Sie das 3Shape Dental System Control Panel
2. Werkzeuge ► Import/Export
3. Wählen Sie “zeramex_p6_v3”. Sichern und schliessen Sie ‘3Shape Dental System Control Panel’.
4. Sie haben erfolgreich die ZERAMEX® P6 ZERABASE Bibliothek installiert.

Bitte wenden Sie sich bei **Fragen zum Import** der Daten in Ihre Software an den **Support Ihres CAD/CAM-Anbieters**.

Bestellen Sie die zur Versorgung benötigten Teile direkt bei ZERAMEX®.

Bestell-Hotline

T 00800 – 93 55 66 37

F 00800 – 93 55 63 77

order@zeramex.com